



Raccords rapides pour turbines

Notice d'utilisation

RT-K1L · RT-K2L · RT-K3L · RT-S1L
RT-S2L · RT-B1L · RT-W1L · RT-N1L



Lire la notice avant toute utilisation

Table des matières

3	Indications pour l'utilisateur
4	Symboles
5	Modèles
6	Destination d'utilisation
7	Instructions de sécurité
8	Connexion et utilisation
9	Nettoyage
10	Maintenance
11	Stockage, élimination et conformité
12	Durée de vie et garantie

Indications pour l'utilisateur

Avant utilisation

Réservé aux chirurgiens-dentistes et au personnel dentaire qualifié. Lire cette notice ainsi que les instructions de la turbine et de l'unité dentaire.

Notice

Disponible sur www.matek-dental.com/ifu. Exemple papier gratuit sur demande.



Fabricant

MATEK Dental Solutions SAS
107 rue du Cardinal de Fleury
71700 Tournus, France

Contact

contact@matek-dental.com
www.matek-dental.com

Statut réglementaire

Dispositif médical de classe I
Règlement (UE) 2017/745 · Marquage CE

Symboles



Fabricant



Consulter la notice d'utilisation



Notice sous forme électronique



Attention



Dispositif médical



Identifiant unique du dispositif



Marquage CE — règlement (UE) 2017/745



Ne pas jeter avec les ordures ménagères (DEEE)

Modèle	Réf.	Description
RT-K1L	9600001	KaVo, ampoule LED, 6 broches, réglage eau
RT-K2L	9600006	KaVo, ampoule LED, 6 broches, sans réglage eau
RT-K3L	9600010	KaVo, dynamo LED, 4 broches M4, sans réglage eau
RT-S1L	9600002	Sirona, ampoule LED, 6 broches, réglage eau
RT-S2L	9600011	Sirona, ampoule LED, 6 broches, sans réglage eau
RT-B1L	9600003	Bien-Air, avec lumière, 6 broches, sans réglage eau

Modèle	Réf.	Description
RT-W1L	9600004	W&H, avec lumière, 6 broches, sans réglage eau
RT-N1L	9600005	NSK, ampoule LED, 6 broches, sans réglage eau
Fourniture	—	Réutilisable, fourni non stérile
Durée de vie	—	5 ans

Destination

Assurer la connexion rapide entre le cordon de l'unit et une turbine compatible et transmettre les fonctions nécessaires à son fonctionnement. Usage professionnel dentaire uniquement.

Instructions de sécurité

Avant chaque utilisation

Vérifier l'absence de dommage, de déformation, de jeu et de fuite. Vérifier que la turbine est correctement verrouillée.

AVERTISSEMENT !

Ne pas utiliser un raccord endommagé ou présentant une anomalie. En cas de fuite, d'échauffement, de bruit anormal ou de mauvaise retenue, arrêter immédiatement l'utilisation.

ATTENTION !

Utiliser uniquement avec le cordon et la turbine compatibles. Ne jamais connecter ou déconnecter le raccord tant que l'air d'entraînement n'est pas complètement arrêté.

ATTENTION !

Ne pas démonter, modifier, laisser tomber ou soumettre le raccord à un choc. Éviter de regarder directement et de manière prolongée la lumière LED.

Connexion et utilisation

1. Arrêter complètement l'air d'entraînement.
2. Aligner les tubes du raccord avec les orifices du cordon. Insérer le raccord bien droit et serrer fermement l'écrou du cordon.
3. Insérer la turbine compatible bien droit jusqu'au verrouillage. Vérifier sa tenue par une légère traction axiale.
4. Pour les modèles avec réglage de l'eau, tourner la bague afin d'ajuster le débit.
5. Avant le traitement, vérifier l'absence de fuite et le bon fonctionnement de la turbine et de la lumière.

Déconnexion

Après arrêt complet, actionner la bague de déverrouillage et retirer la turbine bien droit. Ne pas tirer sur le cordon.

Nettoyage

Dispositif non stérile

Le raccord est fourni non stérile et n'est pas destiné à entrer en contact avec le patient. Avant la première utilisation et après chaque traitement, nettoyer extérieurement le raccord selon le protocole d'hygiène validé de l'établissement.

Procédure

Après arrêt complet, déconnecter le raccord. Essuyer les surfaces avec un chiffon doux, propre et non pelucheux, légèrement humidifié si nécessaire, puis sécher complètement.

INTERDICTIONS

Ne pas immerger. Ne pas utiliser de bain à ultrasons, de laveur-désinfecteur ni d'autoclave. Ne pas utiliser de produits chlorés, de solvants, ni de produits fortement acides ou alcalins. Éviter toute pénétration de liquide dans les contacts et les conduits.

Maintenance

Surfaces optiques

Nettoyer avec un chiffon doux et non pelucheux. Ne pas appuyer sur la lentille de la LED.

Joints toriques

Lubrifier légèrement les joints uniquement lorsqu'ils sont secs. Les remplacer lorsqu'ils sont usés, endommagés ou à l'origine d'une fuite, et au minimum une fois par an.

Orientation de la LED

RT-K1L, RT-K2L, RT-S1L, RT-S2L et RT-N1L : si la LED ne s'allume pas, la retirer, la tourner de 180° autour de son axe, puis la réinsérer sans appuyer sur la lentille.

Contrôle et réparation

Toute réparation doit être effectuée par MATEK ou un centre agréé.

Stockage, élimination et conformité

Stockage

Conserver le raccord propre et sec, dans un endroit ventilé, à l'abri du soleil, de la poussière, de l'humidité et des chocs.

Élimination

Avant élimination, nettoyer le raccord. L'éliminer conformément aux dispositions nationales applicables aux dispositifs médicaux et, pour les composants électriques, aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Durée de vie et garantie

Durée de vie prévue

5 ans à compter de la première mise en service, sous réserve d'un usage et d'un entretien conformes à la présente notice.

Garantie

La garantie est de 12 mois et couvre les défauts de matériau et de fabrication conformément aux conditions commerciales applicables. Elle ne couvre pas l'usure normale, les chocs, les modifications, une utilisation incompatible ni un entretien non conforme. Les ampoules LED ne sont pas garanties,

Assistance

contact@matek-dental.com
www.matek-dental.com

Document

Réf. : IFU-RT-001
Date de révision : 16-09-2024
Français, version originale.